




Der Testkit muss Zimmertemperatur haben!

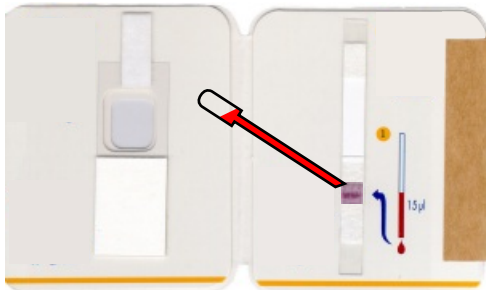


1) 15µl Blut auftragen

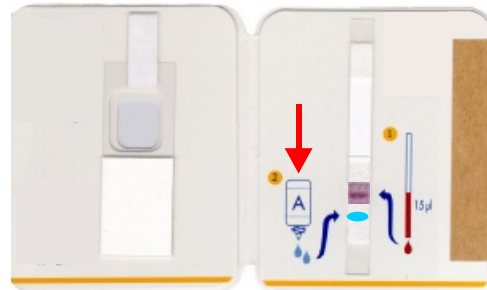

2) 2 Tropfen Puffer **unter** dem Blut auftropfen

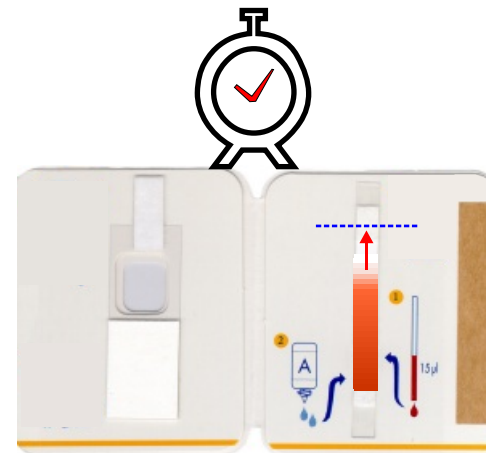


3) Warten bis die Lauffront oben angekommen ist

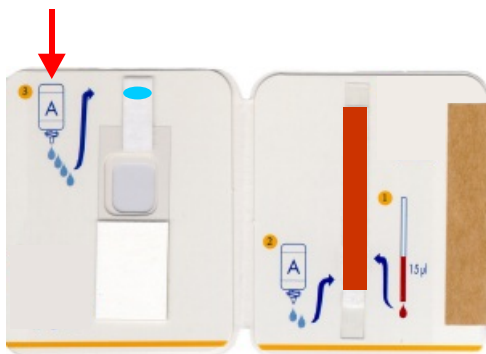

4) Jetzt 4 Tropfen Puffer auf das Flies der Gegenseite auftragen



5) Schutzfolie von den Klebestreifen entfernen, Deckelseiten **fest** andrücken

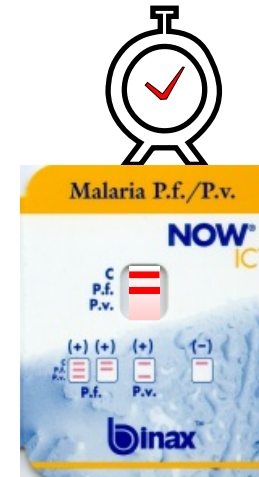


6) Warten bis die Lauffront im Sichtfenster völlig aufgeklart ist

Auswertung:



negativ

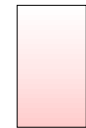

ungültig
(keine obere Bande!)



P. falciparum



P. vivax